

BD Vacutainer®-näyteputkien näytteenottojärjestys ja käsittelysuositus

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos

Näytteenottojärjestys vakuumitekniikalla	Tarratieto	Tutkimukset ja muuta huomioitavaa	Rauhallinen sekoitus, Älä ravistaa!
Veriviljelypullot	B -BaktVi	Veriviljelynäytteet otetaan AINA ensimmäisenä!	~ 4 krt
 2,7 ml Sitraatti- putki  1,8 ml Sitraatti- putki	SITR 2,7	P-INR, P-APTT, P-TT, P-Fibr, P-FiDD, P-AntiFXa 1,8 ml putki on tarkoitettu haastavaan näytteenottoon. Täytettävä merkkiviivaan asti!	~ 4 krt
 4ml ja 6ml Seerumi- putki	SEER4 SEER6 SEER4* SEER6* +4SEER6* +4SEER4*	Näytteenottoon ja tutkimuksiin liittyvät ohjeet löytyvät infokanavalta kohdasta laboratoriotutkimukset tai http://www.phyky.fi/fi/ ammattilaisille/laboratoriokeskus/ laboratoriotutkimukset/	6-10 krt
 3,5ml Seerumi- geeliputki	gSEER 3,5 gSEERAII gSEERMIB		6-10 krt
 3ml Li-hepariini- geeliputki	gLIHEP3	Lista tavallisimmista tutkimuksista kääntöpuolella.	6-10 krt
 4ml ja 6ml Li-hepariini putki, geeliton	LIHEP4 LIHEP6 +4LIHEP4*	Kaikki kromosomitutkimukset	
 3ml ja 6ml EDTA- putki	EDTA3, EDTA6, +4EDTA6*, +4EDTA3*	3 ml: B-PVK + T, Neut, Eos, Diffi, B-HbA1C, E-ABORh, P-VRAB-O, B-Xkoe 6 ml: B-VaraSPR(2x6 ml)	6-10 krt
 4ml Fluoridi- putki	FLUOR4	P-Gluk P-Laktaat	~15 krt
 1,5ml Lasko- putki	LA	B-La (huolellinen sekoitus) Täytettävä alimpaan merkkiviivaan asti!	~15 krt

BD Diagnostics - Preanalytical Systems

Puh. 09-8870 780, Fax: 09-8870 7817

www.bd.com

Päivitetty 03/2018



Yleisiä ohjeita

- Älä koskaan yhdistä putkien sisältöä.
- Kaikissa putkissa oltava putken oma korkki, kun ne viedään laboratorioon. Lisäksi putkissa oltava asianmukainen tutkimustarra tai seuraavat tiedot sisältävä tarra; nimi, henkilötunnus, päivämäärä, kellonaika, pyydetty tutkimus ja pyytävä yksikkö sekä näytteenottajan nimi ja puhelinnumero. Tarrat liimataan pystysuoraan heti korkin alapuolelle, teksti luettavissa ylhäältä alaspäin.
- Sopivuuskoe- (B-Xkoe) ja veriryhmä- (E-ABORh) näyte otetaan aina eri aikaan eri henkilöiden toimesta. Tarrassa oltava näytteenottajan tai mahdollisen tunnistajan nimi **selkeästi** esim. TIKKUKIRJAIMIN seuraavissa tutkimuksissa; E-ABORh, B-Xkoe, P-VRAb-O, B-VaraSPR ja E-Coomb-O.
- Toimita näyte laboratorioon mahdollisimman pian, viimeistään neljän tunnin sisällä näytteenotosta ellei näyte vaadi nopeampaa käsittelyä. Näytteen lämpötila ei saa oleellisesti muuttua säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
- Tarkemmat ohjeet löytyvät infokanavalta kohdasta laboratoriotutkimukset tai <http://www.phyky.fi/fi/ammattilaisille/laboratoriokeskus/laboratoriotutkimukset/>

Li-hepariinigeeliputki (**gLiHEP3**), tavallisimpia tutkimuksia;

P-AFOS
P-ALAT
P-Alb
P-Amyl
P-Bil
fP-Pi
fP-Trigly

P-Ca-albk
P-CK
P-CRP
P-GT
P-K
P-Krea

P-Na
P-PSA
P-Rf
P-T4-V
P-TnT
P-TSH

P-Uraat
fP-Ca
fP-Fe
fP-Kol
fP-Kol-HDL
fP-Kol-LDL

Tarvittaessa voitte kysyä apua terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettua Laboratorion asiakaspalvelusta klo 8:00-15:00 p. 044 719 5040 laboratorio.asiakaspalvelu@phyky.fi